

## Okklusionsset

### Gebrauchsanleitung

Nur die benötigte Menge Okklutest Farbe mit einigen Tropfen Lösungsmittel in der Mulde anrühren und mit dem Applizierpinsel dünn auftragen. Nach kurzer Trockenzeit kann das Objekt auf Früh-Störkontakte überprüft werden. An den roten verfärbten Stellen muss so lange abgetragen werden, bis das Objekt passt.

### Inhalt:

- 1 Okklutest Farbe rot
- 1 Okklulösungsmittel
- 1 Applizierpinsel

### Instructions for use

Take the needed quantity of Occlusions-Test-Color and mix it with some drops of solvent in the trough. Then lay it on weakly with the pencil. After a short time of drying you can check the object for early and disturbing contacts. At the red discolored spots you must take off so long till the object fits.

### Contents

- 1 Occlusion-Test-Color red
- 1 solvent
- 1 pencil