

Pflegeanleitung für Zahnersatz aus Polyan Plus®/ Dentalos Plus®/ Flexistrong Plus®

Sehr geehrter Patient!

Sie haben sich bei Ihrem Zahnersatz für hochwertiges Material aus unserem Hause entschieden.

Die Pflege Ihres Zahnersatzes hat Einfluss auf seine Qualität und Langlebigkeit. Deshalb führen Sie die Pflege und Reinigung wie folgt durch:

herausnehmbarer Zahnersatz (Polyan Plus®, Dentalos Plus®, Flexistrong Plus®)

2x täglich mit Handbürste (Kunststoffborsten) und Kernseife oder Zahnpasta unter fließendem lauwarmen Wasser reinigen.

festsitzender Zahnersatz (Dentalos Plus®, Flexistrong Plus®)

2x täglich mit Zahnbürste und Zahnpasta reinigen

Verwenden Sie **KEINE** handelsüblichen Prothesenreiniger wie Kukident, Corega Tabs o.ä..

Hochprozentige Alkohollösungen (50 - 90%) können bei Langzeitkontakt zu Sprüngen in der Oberfläche (Krakeeles) führen. Normale handelsübliche Spirituosen haben keinen Einfluss auf das Material