

Gebrauchsinformation zum Zementieren für den Zahnarzt

1. Provisorisches Zementieren

Sehr geehrter Anwender,

Die gelieferten Kronen oder Brückenkonstruktionen sind im Innenbereich mechanisch angestrahlt und zum Kleben schon vorbereitet.

Tragen Sie für einen temporären Zeitraum keinen Kunststoffbonder auf. Wir empfehlen, herkömmliche temporäre Kleber zu verwenden (wie z.B. Temp-Bond).

2. Permanente Befestigung im Mund

Die gelieferten Kronen oder Brückenkonstruktionen sind im Innenbereich mechanisch angestrahlt und zum Kleben schon vorbereitet.

Wir empfehlen dual härtende Kunststoffzemente zur permanenten Befestigung. Tragen Sie bitte einen entsprechenden Kunststoffbonder für lichthärtende Materialien dünn auf und lassen Sie diesen nur ablüften, **NICHT lichthärten!** Nach Auftragen des Klebers und Einsetzen in Situ kann dieser lichtgehärtet werden. Bei Lichthärten des Bonders im Vorfeld entsteht aus dem Bonder eine Art Isolierschicht, welche einen perfekten Verbund verhindert.

Bitte achten Sie ebenfalls darauf, dass der Kontakt der Krone mit hochprozentigen Desinfektionsalkoholen länger als 3 Minuten zu Krakeelesprüngen führen kann.

Bei einer entsprechenden Desinfektion empfehlen wir das neuartige Desinfektionsmittel Bacoban, welches bei allen Kunststoffen die bessere Desinfektionsart darstellt und eine entsprechende Schädigung von Hochleistungspolymeren verhindert wird.