


Empfohlene Fräsparameter für DentalPlus Blanks Mono & Multicolor

Schrubben:	2 (2,5) mm
Umdrehung:	17000 - 19000
Vorschub:	1000 - 1200 mm/min
Z-Zustellung:	0,5 mm
Schichten:	1 mm
Umdrehung:	20000 - 25000
Vorschub:	1100 - 1500 mm/min
Details	0,6 mm
Umdrehung:	20000 - 28000
Vorschub:	900 - 1300 mm/min

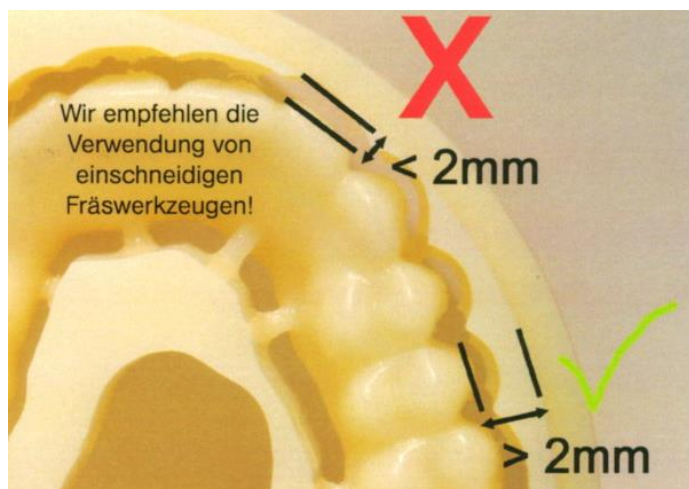

We recommend the use of one cutting tools