



Pflegeanleitung für Zahnersatz aus Eldy Plus® / Polyan Plus®/ Dentalos Plus®/ Flexistrong Plus® Flexiplast Plus/ Polyflex Plus

Sehr geehrter Patient!

Sie haben sich bei Ihrem Zahnersatz für ein hochwertiges Material aus unserem Hause entschieden.

Die Pflege Ihres Zahnersatzes hat Einfluss auf seine Qualität und Langlebigkeit.

Deshalb führen Sie die Pflege und Reinigung wie folgt durch:

herausnehmbarer Zahnersatz

Eldy Plus®, Polyan Plus®, Dentalos Plus®, Flexistrong Plus®, Flexiplast Plus, Polyflex Plus

2x täglich mit Handbürste (Kunststoffborsten) und Kernseife oder Zahnpasta unter fließendem lauwarmem Wasser reinigen.

festsitrender Zahnersatz

Eldy Plus®, Polyan Plus®, Dentalos Plus®, Flexistrong Plus®, Flexiplast Plus, Polyflex Plus

2x täglich mit Zahnbürste und Zahnpasta reinigen

Verwenden Sie **KEINE** handelsüblichen Prothesenreiniger wie Kukident, Corega Tabs o.ä..

Hochprozentige Alkohollösungen (50 - 90%) können bei Langzeitkontakt zu Sprüngen in der Oberfläche (Krakeeles) führen.

Normale handelsübliche Spirituosen haben keinen Einfluss auf das Material.